

“婕希” 聚焦超音波系統

“Jeisys” Focused Ultrasound System

衛部醫器輸字第 032512 號

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用

■ 產品型號：ULTRACel Q+

■ 產品敘述

本產品使用聚焦超音波技術。此技術具有凹面超音波陶瓷產生高頻超音波脈衝，凹面通過聚焦超音波產生熱能。

■ 產品用途

本產品用於臉部眉毛拉提、鬆弛的頰下拉提(本產品可能傷害神經，禁止施打於下巴及下頷骨邊緣)。本產品亦可改善雙頰、下腹及大腿皮膚的緊實。

■ 禁忌症

請勿治療有下列情況的患者：

- 有疱疹病毒感染的患者
- 對局部麻醉產生皮膚過敏的患者
- 有出血性疾病或其他止血功能障礙的患者
- 孕婦及嬰兒
- 蟹足腫(keloid)皮膚
- 皮膚癌
- 乳房植入物
- 治療區域有開放性傷口
- 有機械植體或植入式電子裝置者

■ 注意事項

本產品尚未評估用於以下患者。

- 自體免疫性疾病
- 糖尿病
- 癲癇病
- 急性疾病
- 高血壓
- 皮膚炎

警告

- 本產品僅供符合法規之專業醫師使用，使用前應由醫師評估。

一般安全

- 本產品只能由經過適當培訓的醫師及人員使用。
- 使用本產品時若出現問題，請聯繫原廠。
- 請勿嘗試維修及改造本產品。
- 未經授權的人員進行不當的維修、更改或改造可能會造成危險。
- 只有經過培訓且合格的人員才能使用本產品。如果在系統運行期間出現任何問題，請立即採取措施：將探頭從患者皮膚上拿起，和/或按下紅色緊急停止按鈕以完全停止系統操作。

電氣與防火安全

- 原廠專屬配件探頭、握把與電源線應用於防止觸電的危險。請勿使用損壞的電纜或損壞或漏液的探頭。
- 僅限使用原廠提供的組件及配件。
- 本產品的額定電壓為 AC 100-240V。將主機電源線直接連接到插座。一個插座上有數個插頭可能會導致火災。
- 切勿通過任何 AC 轉接插頭或延長線拆下接地導線或損壞接地導線。
- 由於可能會導致觸電，請注意不要讓任何液體進入本產品。
- 如果由授權服務人員以外的人員拆卸或打開外蓋，可能會導致高壓或高電流曝露。切勿取下握把或主機的蓋子。
- 但是，為了避免任何可能的風險，其他電子設備不應堆疊或放置在本產品旁邊。
- 由於存在起火或爆炸的危險，請勿在易燃材料（如易燃氣體或麻醉劑等）或揮發性物質（如乙醚或酒精等）附近使用本產品。
- 將滅火器放在本產品附近，以應對因短路可能引起的火災。

產品使用與保養

- 本產品握把連接器必須保持清潔和乾燥。如果連接器浸入液體中，請勿使用探頭。
- 運輸本產品時，小心不要掉落握把。
- 運輸本產品過程中請勿傾斜。
- 不要將電線保持在加熱裝置附近，因為電線可能熔斷或短路。
- 安裝在握把支架上的容器最多可容納 3kg。

■ 規格

應用能量	高能聚焦超音波-2, 4, 7MHz
能量	0.1~3J
間距	1~2.0mm
長度	5~25mm
脈衝寬度	達 200ms
聚焦深度	1.5mm, 2.0mm, 3.0 mm, 4.5 mm, 9.0mm
電源	100 V-240V~, 50/60 Hz, 200 VA
尺寸	982.8(高) X 357(寬) X 408.3(深) mm
重量	約 26.7 Kg
觸身部件	探頭

各探頭規格

項次	探頭型號	頻率	深度	能量
1	QS 2.0	7MHz	2.0mm	達 0.4J
2	Q 1.5		1.5mm	達 0.5J
3	Q 3.0		3.0mm	達 1.1J
4	Q 4.5	4MHz	4.5mm	達 1.5J
5	Q 9.0	2MHz	9.0mm	達 3.0J

儲存環境需求

溫度	-20°C ~ +60°C
濕度	低於 95%
大氣壓力	700 ~ 1060 hPa

■ 產品組件

項目		數量	備註
主機		1 台	-
握把		1 支	-
探頭	QS 2.0	1 個	選配
	Q 1.5	1 個	
	Q 3.0	1 個	
	Q 4.5	1 個	
	Q 9.0	1 個	
電源線		1 條	-
握把支架		1 個	-
操作手冊		1 本	-

製造廠名稱：Jeisys Medical Inc.

製造廠地址：401, 308, 307, Daeryung Techno Town 8th, 96, Gamasan-ro,
Geumcheon-gu, Seoul, Korea

藥商名稱：永林生物科技有限公司

藥商地址：依所轄衛生局最新核定之藥商地址內容刊載



ULTRAccl Q+主機及握把支架



握把



探頭



電源線